


長さの計測

- 長さの計測は、足部および脚の内側に対して垂直に行います。
- ℓF、ℓG、ℓAおよびℓZは腹部の計測時と同様に立位姿勢にて、それ以外の測定点は仰臥位にて測ります。

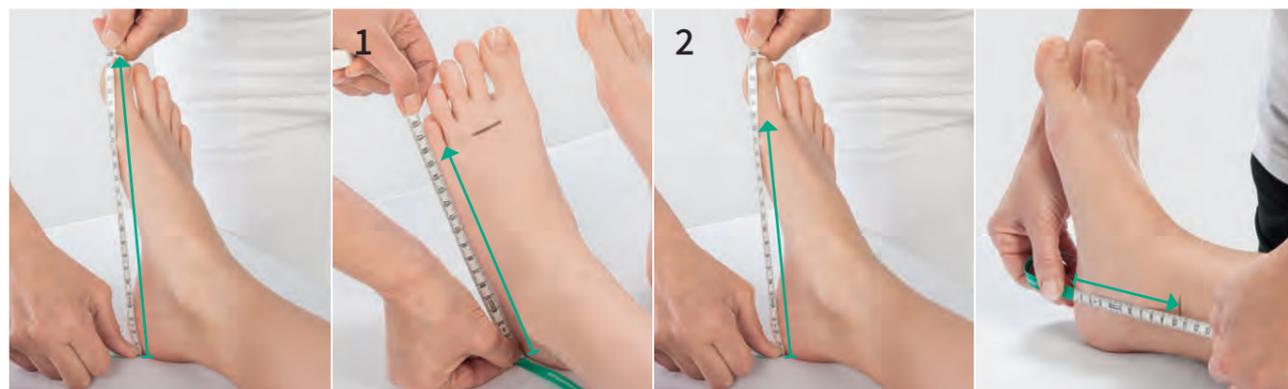

足の全長 ℓZ


つま先ありの場合のみ：
踵から最も長い足趾先端まで
(立位にて)

足の長さ ℓA

- (1) 踵から第5中足趾関節
- (2) 足先斜め加工の場合、足の外側と内側

ℓB

足底から内果の上まで
(足背より指1本程度上)

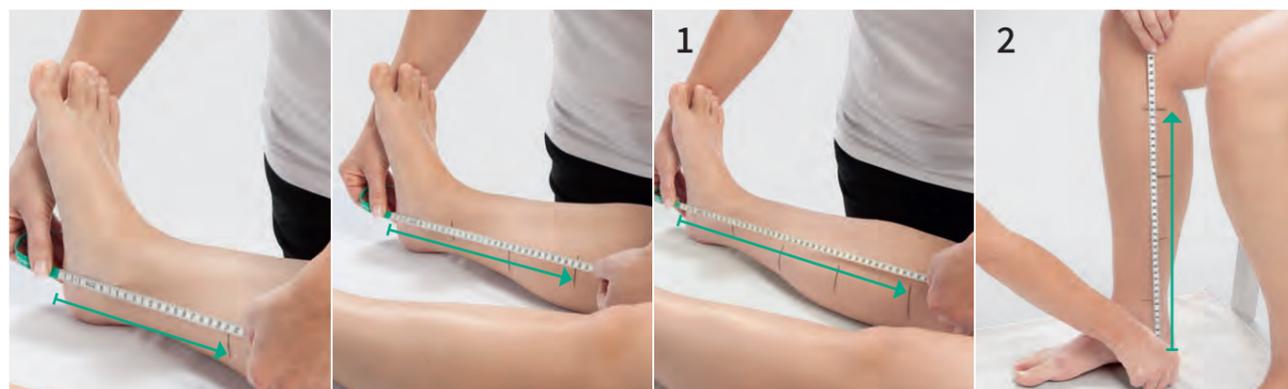

ℓB¹

足底から腓腹筋の始まりまで

ℓC


足底からふくらはぎの
最大部まで

ℓD

- (1) 足底から腓骨頭まで
- (2) 注意：ADの場合はℓDを座位にて再度確認してください

ℓE

足底から膝蓋骨の中間点まで
(2) 解剖学的にcE部分に膝の屈曲がみられる場合：膝窩のシワのラインまで

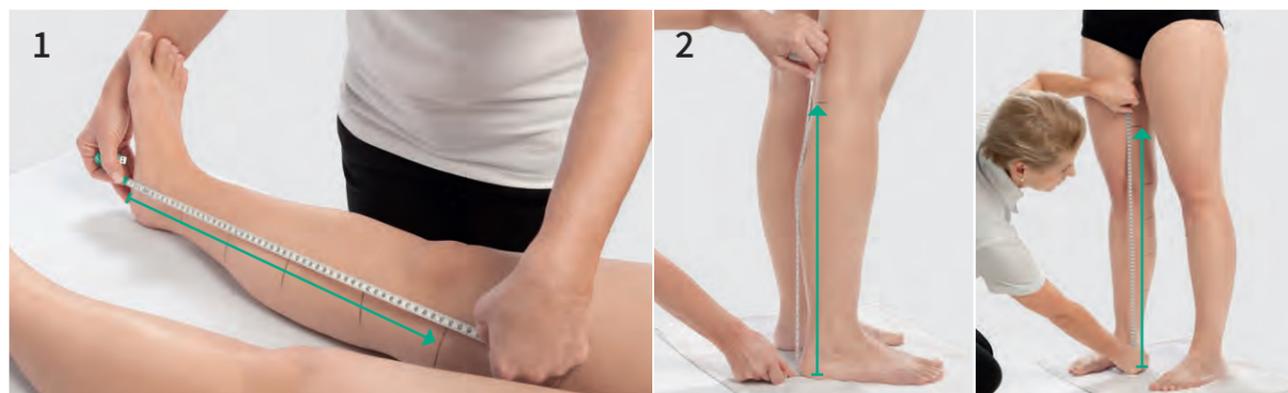


ℓE

- (1) 足底から膝蓋骨の中間点まで
- (2) 解剖学的にcE部分に膝の屈曲がみられる場合：膝窩のシワのラインまで

ℓF

足底から大腿部の中間点まで

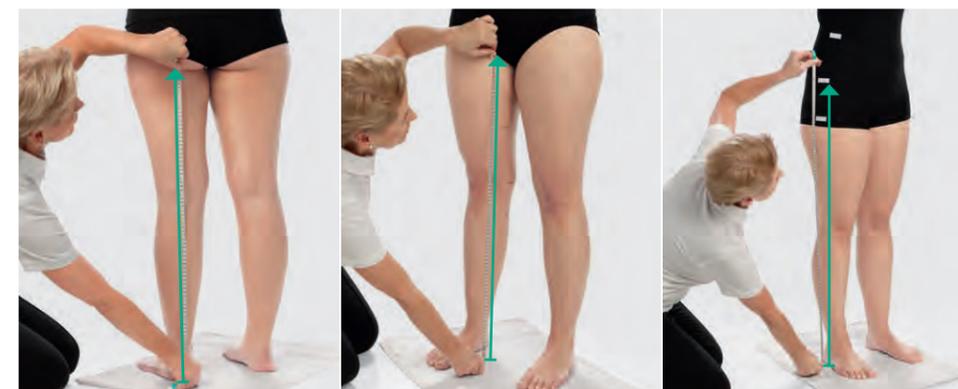

ℓG


AGストッキングの場合：
足底から殿溝まで

ℓG

パンティストッキングの場合：
足底から前面股下まで

ℓH

足底から骨盤の最も幅の広い
部分まで

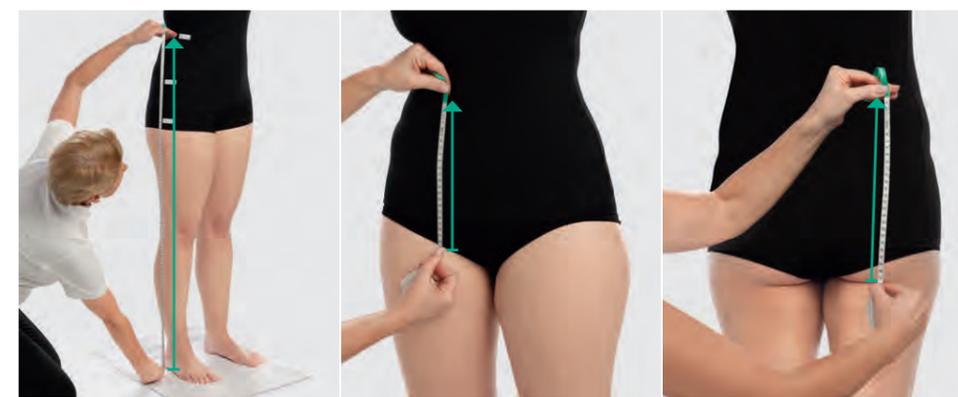

ℓT

足底からウエストもしくは
パンティストッキングの
上端の高さまで

ℓKT 前面

股下からパンティストッキング
の上端まで

ℓKT 後面

殿溝からパンティストッキング
の上端まで

製品の体幹部分は滑り落ちないように腸骨稜、またはウエストの中心部まで及んでいる必要があります。周径が大きい場合は短く計測しないようにしてください。結合組織が柔らかい場合は張力をかけて測ってください。